



schülke wipes

Feuchttuchspendersystem zum eigenständigen Befüllen von schülke Flächendesinfektionsmitteln.

Unser Plus:

- extra große Tücher (30 x 30 cm) zum Wischen großer Flächen
- 90 Tücher pro Rolle
- einfache Handhabung
- hinterlässt keine Tuchrückstände auf der Oberfläche

Anwendungsgebiete

schülke wipes Feuchttücher können zur Flächendesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten sowie Flächen aller Art eingesetzt werden.

Anwendungshinweise

Die gebrauchsfertig getränkten Tücher aus der Deckelöffnung ziehen und abreißen. Nach Entnahme die Deckelöffnung wieder fest verschließen, damit die Tücher nicht austrocknen. Fläche mit den getränkten Tüchern wischen und auf gute Benetzung achten.

Durch den flexiblen Einsatz des Desinfektionsmittels können Sie sowohl eine Schnelldesinfektion zwischen dem Patienten, sowie die tägliche abschließende Wischdesinfektion am Praxisende durchführen.

Schnelldesinfektion: mit mikrocid® AF liquid alle alkoholverträglichen Flächen innerhalb kürzester Zeit streifenfrei desinfizieren.

Bei sensiblen Medizinprodukten und Oberflächen, die nicht alkoholverträglich sind (z. B. Polster, Displays, Acrylglas, Ultraschallköpfe), empfehlen wir Ihnen die Tränkung der Tücher mit unserem mikrocid® sensitive liquid.

(Bestellnummern befinden sich auf der Rückseite.)

Vorbereitung zur Tuchentnahme

Handschuhe anziehen. Deckel des Feuchttuchspenders öffnen und Vliesrolle einsetzen. Anschließend 2 – 2,5 Liter gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung zugeben.

Vliestuch durch Entnahmeöffnung des Deckels ziehen und Deckel fest auf den Eimer drücken.

Tränkung der Tücher

Damit alle Tücher mit der Wirkstofflösung durchgetränkt sind, warten Sie bitte ca. 20 Minuten nach Einfüllen der Desinfektionsmittellösung. Verwenden Sie Präparate von schülke in gewünschter Konzentration.

(Beachten Sie hierzu die jeweilige Präparate-Information.)

schülke wipes

schülke -+

Product • Präparat • Préparation • Preparato

Concentration • Konzentration • Concentration • Concentrazione

Reaction time • Einwirkzeit • Temps d'action • tempi d'applicazione

Filled on • Befüllt am • Rempli le • Riemplito il

Use by • Verwendbar bis • A utiliser avant le • Data die scadenza

23302-B
LOT

www.schuelke.com

Dokumentieren Sie den Präparatenamen, die Einsatzkonzentration, das Befülldatum sowie die Verwendbarkeit auf dem Etikett, welches der Vliestuchrolle beiliegt.

Kleben Sie es auf das vorgesehene Feld.

schülke wipes

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Unter anderem können Sie folgende Präparate in Kombination mit den schülke wipes einsetzen:

Präparate	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
mikrozid® AF liquid	10 x 1 l	109 101
	1 x 10 l	109 102
mikrozid® sensitive liquid	10 x 1 l	109 185
	1 x 5 l	109 193

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
Feuchttuchspendersystem schülke wipes	1 x Spender	119 521
	1 Karton à 6 Tuchrollen	119 520

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Mikrobiologische Wirksamkeiten,

Die mikrobiologische Wirksamkeiten sowie die Einsatzkonzentrationen entnehmen Sie bitte unserem jeweiligen Flächendesinfektionsmittel.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick der zum Feuchttuchspendersystem schülke wipes vorliegenden Gutachten finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für Ihre individuellen Fragen:

Produkt-/Anwendungsberatung Telefon 040/521 00-666



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Schweiz
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01 - 0
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01 - 60
office.austria@schuelke.com